

Multi-Gyn® LIQUIGEL



PAŽLJIVO PROČITAJTE OVU UPUTU ZA UPORABU PRIJE PRIMJENE MULTI-GYN LIQUIGEL-a I SAČUVAJTE JU KAO PODSJETNIK

Multi-Gyn LiquiGel - liječi i ublažava suhoću rodnice

- trenutno ublažava suhoću rodnice i potiče prirodnu vlažnost
- sprječava nadraženost i održava tkivo rodnice
- nadopunjuje i podržava prirodnu vlažnost rodnice
- prirodan je, siguran i štiti floru rodnice

Kako djeluje Multi-Gyn LiquiGel

Multi-Gyn LiquiGel trenutno ublažava suhoću rodnice. Optimizira stanje tkiva rodnice i potiče prirodnu vlažnost tkiva. Multi-Gyn LiquiGel se temelji na patentiranom 2QR-kompleksu. Ova prirodna tvar potječe od biljaka i sastoji se od bioaktivnih polisaharida. Ima jedinstvenu sposobnost neutralizacije štetnih mikroorganizama na siguran i učinkovit način. Stoga je također prikladan za potporu procesu prirodnog zacjeljivanja oštećenja tkiva u intimnom području.

Multi-Gyn LiquiGel potiče vlažnost rodnice koja pomaže ublažiti i zaštititi od suhoće rodnice i nadraženosti. Pomaže tijelu u vlastitom procesu vlaženja u postizanju prirodne ravnoteže i ne utječe na floru rodnice. Kako se tkivo rodnice ponovo vlaži, oporavlja prirodnu elastičnost i funkcije. Multi-Gyn LiquiGel stvara bio-pripranjajući sloj preko sluznice, kako bi se osigurala dugotrajna vlažnost i održavanje zdrave flore rodnice. Tijekom spolnog odnosa nadopunjuje i podržava prirodnu vlažnost rodnice. Redovitom primjenom LiquiGela, smanjuje se nadraženost i podržava optimalno stanje rodnice. Sastav je prirodan, siguran i blag jer se ne temelji na toksičnim tvarima niti jakim kemikalijama pa stoga nema štetnih događaja.

Multi-Gyn LiquiGel nije hormonsko liječenje, ali je, zbog jedinstvenog načina djelovanja, medicinski proizvod klase rizika IIa.

Indikacije

- suhoća rodnice tijekom i nakon menopauze
- suhoća rodnice uzrokovana hormonskim promjenama, lijekovima i stresom
- suhoća rodnice tijekom spolnog odnosa
- atrofija rodnice, nadraženost i/ili nelagodna

Uputa za uporabu


- **U slučaju suhoće rodnice**, primijenite Multi-Gyn LiquiGel u dostatnoj količini barem jednom dnevno ili kad god je potrebno olakšanje simptoma.
- **Za sprječavanje suhoće rodnice i nadraženosti povezane sa suhoćom rodnice, primijenite Multi-Gyn LiquiGel dvaput dnevno u dostatnoj količini, tijekom najmanje pet dana.**
- **Za poticanje prirodne vlažnosti rodnice**, primijenite Multi-Gyn LiquiGel svaki dan, neposredno prije odlaska na spavanje.

Gel ne ostavlja mrlje na donjem rublju. Siguran je i blag te će Vam pružiti izravno olakšanje


Primjena

• Vanjska primjena


U slučaju suhoće vanjskog intimnog područja (stidnica), Multi-Gyn LiquiGel možete nanijeti prstom (uvijek operite ruke prije i nakon primjene gela).

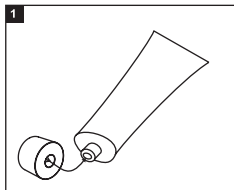


1. Skinite zatvarač s tube. Prije prve uporabe, obrnutom stranom zatvarača probušite birtvu na tubi.

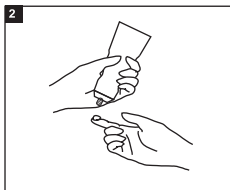

2. Držite tubu jednom rukom, a kažiprst druge ruke približite tubi kao što je prikazano na slici. Lagano stisnite tubu. Nastavite je stiskati dok ne istisnete dostatnu količinu na kažiprst, kao što je prikazano na slici.

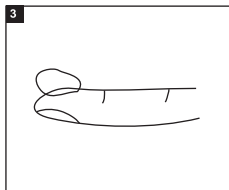

3. Količina istisnuta na kažiprst treba biti velika barem kao jagodica prsta (2 ml)

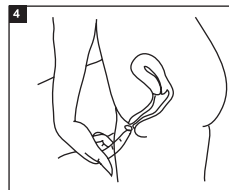

4. Nanosite gel na vanjsko intimno područje.

od suhoće rodnice, nadraženosti i svrbeža. Multi-Gyn LiquiGel ne smije se primjenjivati dulje od 30 uzastopnih dana tako da se flora rodnice može sama regulirati bez podrške. U slučaju trajnih ili ponavljajućih tegoba, uvijek se trebate obratiti liječniku.

Napomena!

Multi-Gyn LiquiGel je djelatni proizvod koji vlaži intimno područje, održava i potiče prirodnu vlažnost tkiva. Kao djelatni proizvod, Multi-Gyn LiquiGel može stvoriti osjećaj topline i peckanja nakon primjene. To je sasvim normalno i nestat će nakon nekoliko minuta.

Sastojci

LiquiGel sadrži više od 25% 2QR-kompleksa. Ostali sastojci su biljni glicerol, prirodni zgušnjivač ksantan guma i prirodni regulator „staničnih tekućina“ (osmotski regulator) betain.

Multi-Gyn LiquiGel ne sadrži konzervanse, hormone, silikone, sastojke životinjskog podrijetla, jake kemijske tvari ili mirise te je potpuno neškodljiv. Nije mastan, ne ostavlja mrlje i topljiv je u vodi. Ne utječe na tamponne ili na prezervative.

Djelatni sastojci

krosopolimer galaktoarabinana i poliglukturonske kiseline*, glicerol, betain, ksantan guma *2QR-kompleks: patentirani bioaktivni polisaharidi. www.2QR.com

Alergije na sastojke Multi-Gyn LiquiGela vrlo su rijetke. Kada imate nedoumicu, nanesite malu količinu gela na unutarnju stranu ruke. Ako se pojavi crvena mrlja koja svrbi, savjetujemo da ne primjenjujete Multi-Gyn Liquigel.

Štetni događaji

Multi-Gyn Liquigel nema poznatih štetnih događaja i sigurnog je i prirodnog sastava. Multi-Gyn Liquigel nije kontraceptiv i ne sadrži spermicide. Međutim, utjecaj na aktivnost stanica sperme nije istražena.

Primjena s lijekovima

Multi-Gyn LiquiGel ne utječe na lijekove.

Trudnoća i dojenje

Nema poznatih kontraindikacija za primjenu Multi-Gyn LiquiGela tijekom trudnoće i dojenja.

Čuvanje

Savjetuje se Multi-Gyn LiquiGel čuvati na temperaturi između 10°C i 25°C (sobna temperatura).

Boja gela

Boja Multi-Gyn LiquiGela može varirati. To je povezano s glavnim prirodnim sastojkom, 2QR-kompleksom. Stoga proizvodi mogu imati različitu boju od prozirnog do svijetlo-tamno jantarnog. Boja ne utječe na djelotvornost ni sigurnost proizvoda.

Proizvođač:

BioClin BV, Delftechpark 55,
2628 XJ, Delft, Nizozemska

WWW.MULTI-GYN.COM




0482


BC1221.3
B16
07818671

• Unutarnja primjena


Može se upotrijebiti poseban aplikator. Dodan je u kutiju i može se pričvrstiti na tubu. Nakon primjene možete ostaviti aplikator na tubi, isprati ga toplom vodom i zatim staviti zatvarač na aplikator. Ako želite koristiti prst; operite ruke i na vrh kažiprsta nanesite količinu veliku barem kao jagodica prsta. Stavite prst u rodnicu.

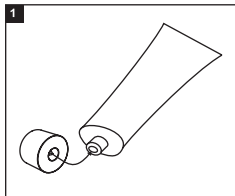


1. Skinite zatvarač s tube. Prije prve uporabe, obrnutom stranom zatvarača probušite birtvu na tubi.

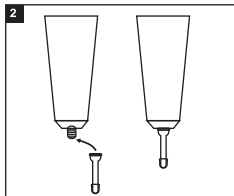


2. Pričvrstite posebni aplikator, koji se nalazi u kutiji, na navoj na tubi.

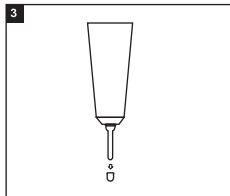


3. Skinite mali zatvarač s aplikatora.

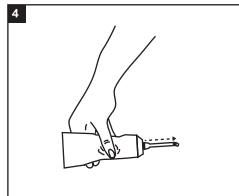


4. Držite tubu jednom rukom i lagano stišćite dok s prednje strane aplikatora ne izađe gel. Kad gel izađe, znate da je aplikator napunjen gelom i spreman za uporabu. Isprobajte koliko će izaći ako lagano stisnete. Potrebna vam je količina velika barem kao jagodica prsta (2 ml).

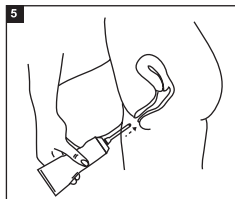


5. Umetnite aplikator, koji je i dalje na tubi, u rodnicu, kao što je prikazano na slici. Rodnica je duga 7-8 cm te odgovara ženskom kažiprstu. Duljina aplikatora približno je jednaka duljini kažiprsta te neće oštetiti grlić maternice.

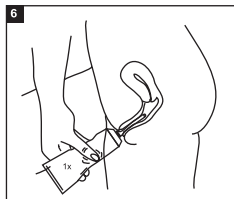

6. Lagano stisnite tubu. Potrebna vam je količina velika barem kao jagodica prsta. Međutim, nema ograničenja niti opasnosti ako primijenite više.

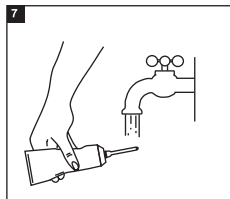

7. Nakon uporabe aplikator možete ostaviti na tubi i isprati ga toplom vodom.

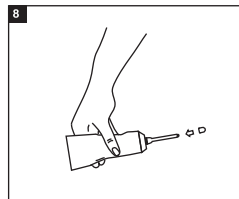

8. Vratite mali zatvarač na aplikator.

Dodatne informacije

Sušoća rodnice i tegobe pojavljuju se često

Sušoća rodnice i tegobe utječu na polovicu žena svih dobnih skupina. To je osobito problem koji se prirodno pojavljuje u žena tijekom i nakon menopauze zbog hormonskih promjena. Uobičajeno, stijenka rodnice je podmazana (obložena) tankim slojem prozirne tekućine. Tijekom menopauze, pad razine estrogena smanjuje količinu dostupne vlage. To također čini rodnicu tanjom i manje elastičnom. To je i druga najčešća tegoba svih spolno aktivnih žena. Mnoge žene prvo uoče suhoću rodnice kada spolni odnos postane neugodan, čak bolan. To može potkopati samopouzdanje, raspoloženje i utjecati na normalne dnevne aktivnosti i uzrokovati opći osjećaj nelagodje.

Uzroci suhoće rodnice

Najčešći uzrok je smanjenje prirodnih tekućina rodnice zbog hormonskih promjena, kao što je u drugoj polovici menstrualnog ciklusa ili vezano uz menopauzu. Ali mnogo je i drugih čimbenika koji mogu uzrokovati ili pojačati problem, kao što su: uporaba hormonskih kontraceptiva ili određenih lijekova, sapuna, tampona, stres, umor, trudnoća i porod, te također spolni odnos bez ispravnog podmazivanja prirodnim tekućinama ili pogodnim proizvodom kao što je Liguigel.