

Multi-Gyn® VAGINAL DOUCHE



PAŽLJIVO PROČITAJTE OVU UPUTU ZA UPORABU PRIJE PRIMJENE Multi-Gyn® bočice za ispiranje rodnice i Multi-Gyn® tableta I SAČUVAJTE JU KAO PODSJETNIK

Multi-Gyn bočica za ispiranje rodnice - za optimalnu higijenu rodnice prilagođenu ženama

- Ispirite čisto, učinkovito i nježno
- Poseban ventil onemogućuje povratno usisavanje tekućine, umanjuje nastanak tlaka i stvara idealan učinak ispiranja
- Ergonomski oblikovana bočica za ispiranje koja se može koristiti u raznim položajima

Primjena

- Opća higijena rodnice
- Intenzivna higijena rodnice u slučaju pojačanog iscjelka ili iscjelka neugodnog mirisa, svrbeži, nadražaja i osjećaja žarenja

Upuća za uporabu

Neke žene su osjetljivije na tegobe rodnice od drugih zbog načina života, spolne aktivnosti ili mjesečnice. Ovisno o osobnim higijenskim potrebama Multi-Gyn bočica za ispiranje rodnice može se koristiti češće; no ne preporuča se koristiti Multi-Gyn bočicu za ispiranje rodnice više od 3 puta tjedno osim ako liječnik ne preporuči drugačije.

Uvijek se obratite liječniku kada su tegobe rodnice ustrajne.

Multi-Gyn bočica za ispiranje rodnice može se primijeniti u nekoliko željenih položaja. Nađite vama najugodniji položaj primjene Multi-Gyn bočice za ispiranje rodnice. Važno je da otopina za ispiranje može lako otečati. Na primjer pod tušem ili iznad WC školjke. Molimo pogledajte ilustrirane upute za uporabu Multi-Gyn bočice za ispiranje rodnice dojenja.

Multi-Gyn bočica za ispiranje rodnice i trudnoća


Ako planirate trudnoću, savjetujemo da ne koristite Multi-Gyn bočicu za ispiranje rodnice do 3 dana nakon spolnog odnosa.

Multi-Gyn bočica za ispiranje rodnice nije kontraceptiv. Nema poznatih kontraindikacija za primjenu Multi-Gyn bočice za ispiranje rodnice ili Multi-gyn tableta tijekom trudnoće i dojenja.

Međutim, uvijek savjetujemo da se obratite svom liječniku ako ste trudni.

Važno!

Nikad ne stavljajte Multi-Gyn bočicu za ispiranje u kipuću vodu, niti ju čistite kipućom vodom. Time će nepovratno promijeniti oblik.

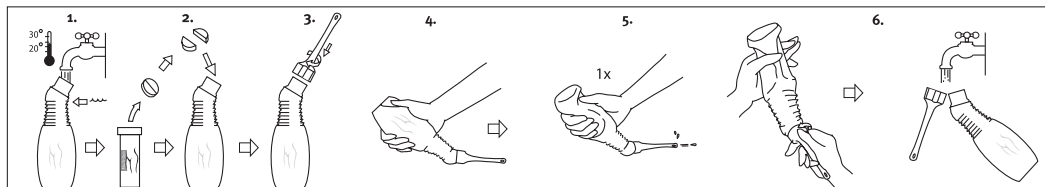

1. Napunite Multi-Gyn bočicu za ispiranje rodnice mlakom vodom do vrha rebrastog dijela bočice.
2. Prelomite jednu Multi-Gyn tabletu i dodajte je u vodu.
3. Pričvrstite aplikator na bočicu i pričekajte da se Multi-Gyn tableta potpuno otopi i prestane pjenući.

4. Nježno stavite aplikator u rodnicu.
5. Stisnite bočicu za čišćenje rodnice tekućinom za ispiranje. Normalno je da tekućina (do pola bočice) ostane u bočici*.
6. Odvojite bočicu i aplikator i temeljito isperite s toplom vodom. Ostavite da se prirodno osuši

(po mogućnosti na suhom mjestu).
* Količina otopine je dovoljna za ispiranje rodnice. Ako želite isprati ponovo, s preostalom otopinom, odvijte aplikator s bočice da se vrati u početni oblik i nastavite od koraka 4.

Multi-Gyn® TABLETS

Multi-Gyn tablete - stvaraju prirodnu i blagu otopinu za optimalnu higijenu rodnice

Svojstva proizvoda

- jedna tableta je dovoljna za jednu bočicu otopine za ispiranje
- sadrži prirodne sastojke, ne sadrži konzervanse i miris.
- u kombinaciji s Multi-Gyn bočicom za ispiranje rodnice, tablete pružaju optimalnu higijenu rodnice

Blage tablete za ispiranje rodnice s prirodnim sastojcima

Multi-Gyn tablete, otopljene u mlakoj vodi, stvaraju blagu otopinu za ispiranje pogodnu za primjenu s Multi-Gyn bočicom za ispiranje rodnice. Koncentrirane šumeće tablete sadrže prirodne sastojke i ne sadrže konzervanse. Sastojci koji se koriste u Multi-Gyn tabletama nemaju negativan učinak na prirodnu floru rodnice.

Djelatni sastojci

2QR-kompleks*, mliječna kiselina, askorbatna kiselina. Sadrži: laktozu.

*2QR-kompleks, patentirani bioaktivni polisaharidi.

Tablete imaju zrnati izgled i mogu malo varirati u boji. Ove manje varijacije odnose se na prirodna svojstva glavnog djelatnog sastojka 2QR-kompleksa. Ne utječu na djelotvornost ili sigurnost proizvoda.

Čuvanje

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece. Savjetuje se čuvati Multi-Gyn tablete u originalnoj tubi na suhom mjestu, na temperaturi između 10°C i 25°C (sobna temperatura).

Proizvođač:

BioClin BV, Delftechpark 55,
2628 XJ, Delft, Nizozemska

WWW.MULTI-GYN.COM



0482

BC130L7
C16