

Multi-Gyn® bočica za ispiranje rodnice

Multi-Gyn®



Pažljivo pročitajte ovu uputu za uporabu prije primjene Multi-Gyn bočice za ispiranje rodnice i Multi-Gyn tableta i sačuvajte ju kao podsjetnik

MULTI-GYN BOČICA ZA ISPIRANJE RODNICE ZA OPTIMALNU HIGIJENU RODNICE

- Ispire čisto, učinkovito i nježno
- Posebni ventil onemogućuje povrat otopine u bočicu, smanjuje povišenje tlaka (u bočici) i stvara idealan učinak ispiranja
- Ergonomski oblikovana bočica za ispiranje može se primijeniti u raznim položajima

INDIKACIJE

Multi-Gyn bočica za ispiranje rodnice i tablete, idealno za opću higijenu rodnice ili za intenzivnu higijenu rodnice u slučaju pojačanog iscjeka ili iscjeka neugodnog mirisa, svrbeža, nadražaja ili osjećaja žarenja.

UPUTA ZA UPORABU

Neke žene su osjetljivije na tegobe rodnice od drugih zbog načina života, spolne aktivnosti ili mjesečnice. Ovisno o osobnim higijenskim potrebama Multi-Gyn bočica za ispiranje rodnice može se koristiti češće; međutim ne preporuča se koristiti Multi-Gyn bočicu za


ispiranje rodnice češće od 1 puta tjedno osim ako liječnik ne savjetuje drugačije. Uvijek se obratite liječniku kada su tegobe rodnice ustrajne. Multi-Gyn bočica za ispiranje rodnice može se primijeniti u nekoliko željenih položaja. Pronađite vama najugodniji položaj primjene Multi-Gyn bočice za ispiranje rodnice. Važno je da otopina za ispiranje može lako istjecati. Primjerice, pod tušem ili iznad WC školjke. Molimo pogledajte dolje ilustrirane upute za uporabu Multi-Gyn bočice za ispiranje rodnice.

MULTI-GYN BOČICA ZA ISPIRANJE RODNICE I TRUDNOĆA

Ako planirate trudnoću, savjetujemo ne koristiti Multi-Gyn bočicu za ispiranje rodnice od 3 dana nakon spolnog odnosa. Multi-Gyn bočica za ispiranje rodnice nije kontraceptiv. Nema poznatih kontraindikacija za primjenu Multi-Gyn bočice za ispiranje rodnice ili Multi-Gyn tableta tijekom trudnoće ili dojenja. Međutim, uvijek savjetujemo da se obratite svom liječniku ako ste trudni.

VAŽNA NAPOMENA!

Nikada ne stavljajte Multi-Gyn bočicu za ispiranje rodnice u kipuću vodu, niti ju čistite kipućom vodom. Time će nepovratno promijeniti oblik.

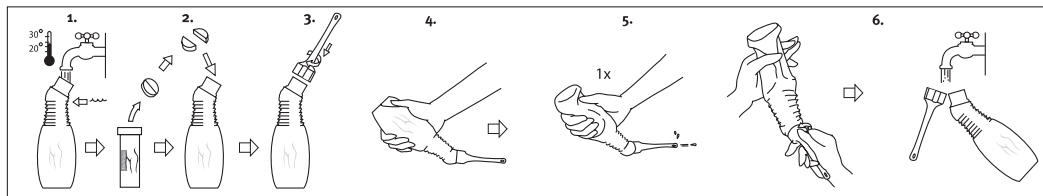

1. Napunite Multi-Gyn bočicu za ispiranje rodnice mlakom vodom do vrha rebrastog dijela bočice.
2. Prelomite jednu Multi-Gyn tabletu i dodajte je u vodu.
3. Pričvrstite aplikator na bočicu i pričekajte dok se Multi-Gyn tableta potpuno otopi i prestane pjeniti.

4. Nježno stavite aplikator u rodnicu.
5. Nježno stisnite bočicu i očistite rodnicu otopinom za ispiranje. Normalno je da otopina (do pola bočice) ostane u bočici.*
6. Odvojite bočicu i aplikator i temeljito ih isperite toplom vodom. Ostavite da se osuše na zraku (po mogućnosti na suhom mjestu).

*Količina otopine je dovoljna za ispiranje rodnice. Ako želite ponovo isprati s preostalim otopinom, odvijte aplikator s bočice da se bočica vrati u početni oblik i nastavite od koraka 4.

Multi-Gyn® tablete

MULTI-GYN TABLETE STVARAJU PRIRODNU I BLAGU OTOPINU ZA ISPIRANJE ZA OPTIMALNU HIGIJENU RODNICE

- Jedna tableta je dovoljna za jednu bočicu otopine za ispiranje
- Sadrži prirodne sastojke te ne sadrži parfeme
- U kombinaciji s Multi-Gyn bočicom za ispiranje rodnice, tablete pružaju optimalnu higijenu rodnice

BLAGE TABLETE ZA ISPIRANJE RODNICE S PRIRODNIH SASTOJCI

Multi-Gyn tablete, otopljene u mlakoj vodi, stvaraju blagu otopinu za ispiranje pogodnu za primjenu s Multi-Gyn bočicom za ispiranje rodnice. Koncentrirane šumeće tablete sadrže prirodne sastojke.

SASTOJCI

Laktoza, limunska kiselina, natrijev bikarbonat, mliječna kiselina, polisaharidi lista Aloe

Barbadensis, askorbatna kiselina.

Glavni aktivni sastojak 2QR-praškastog kompleksa: patentom zaštićeni bioaktivni polisaharidi pročišćeni iz ekstrakta lista Aloe Barbadensis.

Tablete imaju znatni izgled i mogu se malo razlikovati u boji. Ove male razlike odnose se na prirodna svojstva glavne djelatne tvari, 2QR kompleksa. Ne utječu na djelotvornost ili sigurnost proizvoda.

ČUVANJE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece. Savjetuje se čuvati Multi-Gyn tablete u originalnoj tubi, na suhom mjestu, na temperaturi između 10 °C i 25 °C (sobna temperatura).

Distributer za Republiku Hrvatsku: Oktal Pharma d.o.o., Utijska 40, 10020 Zagreb

Proizvođač:

BioClin BV, Delftechpark 55, 2628 XJ, Delft, Nizozemska